


1 Bu sayfayı A4 kağıda çıktı alın.

Ölçeklendirme yapmadan,
Gerçek boyut seçeneği ile.

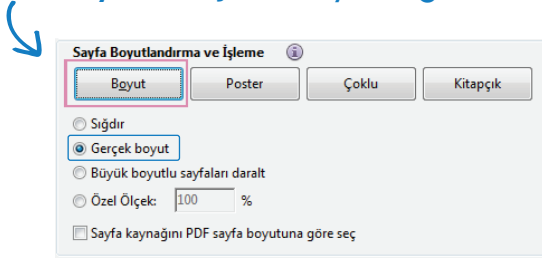

2 Çıktıyı masa gibi sert bir yüzeye yerleştirin ve aşağıdaki adımları izeleyin.



OTIFLEKS KULAK TİKAÇLARI

BOYUT BELİRLEME DÖKÜMANI

1. ADIM - Serçe parmağınızı ilk çizgiye hizalı bir şekilde kağıdın üzerine yerleştirin.

Parmağınızı bastırmayın.

2. ADIM - Serçe parmağınızın hangi çizgiye denk geldiğini belirleyerek size uygun olan kulak tıkacı boyunu belirleyin.

Emin olamıyorsanız büyük boyu tercih edin.

